

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere e seguire le istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante

MASCHERINA DI PROTEZIONE IN TNT TIPO 1 Modello: LN MASK LAVABILE

DM CLASSE I NON STERILI - Tipo 1 secondo UNI EN 14683:2019



COME INDOSSARE IL DISPOSITIVO

Prima dell'uso, verificare lo stato del dispositivo, NON utilizzare la mascherina nel caso in cui presenti danni (strappi, tagli, mancanza dei dispositivi di fissaggio, ecc) o che presenti sporcizia in corrispondenza del lato per la respirazione

1. Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica.
2. Indossare la mascherina mettendo gli elastici dietro alle orecchie.
3. Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto.
4. Per verificare che il dispositivo sia stato indossato correttamente, coprire la mascherina con le mani e respirare. Se l'aria scorre intorno alle narici, sistemare nuovamente la mascherina. Se si notano fughe lungo i bordi della mascherina, sistemare nuovamente il dispositivo sul volto. Ripetere l'operazione sino ad ottenere un risultato ottimale.

Se non riesce ad indossare correttamente la mascherina, evitare la zona contaminata.

PRECAUZIONI D'UTILIZZO

1. Se non si eseguono scrupolosamente le istruzioni per l'uso e le limitazioni relative all'utilizzo della mascherina e/o non si usa la stessa durante l'intero periodo di esposizione, l'efficacia della mascherina risulterà inferiore e potrà portare a contaminazione o morte.
2. Prima dell'uso l'utilizzatore deve informarsi sull'uso corretto della mascherina in conformità con le indicazioni di sicurezza e di salute applicabili.
3. La mascherina non deve essere utilizzata in ambienti sterili e asettici, quali sale operatorie, ambulatori, e qualsiasi ambiente dove deve essere garantita la sterilità in quanto **DISPOSITIVO NON STERILE** di TIPO I secondo la norma EN 14683:2019.
4. Se la mascherina risulta danneggiata o se si fatica a respirare, abbandonare immediatamente la zona contaminata, rimuovere e sostituire la mascherina.
5. Non alterare né modificare la mascherina.

VITA UTILE

l'eccessiva resistenza alla respirazione indica l'ostruzione della mascherina alle particelle di polvere, la mascherina è un dispositivo individuale, la durata massima di utilizzo è per un turno di lavoro o 8 ore al giorno. In seguito la mascherina dovrà essere lavata a 40° come prescritto dal fabbricante (*il ciclo d'utilizzo del dispositivo consente massimo 10 lavaggi*).



DM CLASSE 1 TIPO I UNI EN ISO 14683:2019